



Oxivir Sporicide Wipe CE

Reiniger en desinfectant voor niet-invasieve medische hulpmiddelen

Omschrijving

Diversey Oxivir Sporicide Wipe CE is een eenstaps reinigings- en desinfectiedoekje effectief tegen *Clostridium difficile* en *Bacillus subtilis*. Oxivir Sporicide Wipe CE is gebaseerd op Diversey's gepatenteerde AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) formulering en kan worden gebruikt op niet-invasieve medische hulpmiddelen.

Eigenschappen

- Effectief tegen *C difficile* in 1 minuut*
- Sporicide, Bactericide, Virusdodend, Gistdodend, Schimmeldodend, in slechts 1 minuut
- Positief gebruikers- en oppervlakte veiligheidsprofiel, vergeleken bij andere sporicides
- Effectieve reiniger
- Geurloos
- Breekt actief af in water en zuurstof - Laat geen actieve residuen achter op het oppervlak
- Bevat geen chlorine of alcohol

Voordelen

- Uitstekende reactie op *C difficile* uitbraak
- Brede effectiviteit tegen alle andere pathogene klassen bieden de hoogste niveaus van patiëntbescherming
- Korte contacttijden zorgen dat het oppervlak vochtig blijft waardoor de desinfectie-effectiviteit wordt verzekerd
- Naspoelen niet nodig
- Veroorzaakt geen irritatie aan de luchtwegen
- Geschikt voor gebruik in hoge risico gebieden in Gezondheidszorg, waaronder ICU, NICU, patiënten- en isolatiekamers.

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder grove vervuiling
2. Open de deksel van de verpakking, haal er een doekje uit en sluit de verpakking
3. Veeg over het oppervlak en zorg ervoor dat het totale oppervlak vochtig wordt, laat aan de lucht drogen
4. Zorg ervoor dat het oppervlak vochtig blijft voor de duur van de contacttijd
5. Vervang het doekje als het oppervlak niet meer vochtig wordt, het zichtbaar vervuild is of als er een andere ruimte gereinigd gaat worden

*Indien gebruikt als terminaal desinfectiemiddel volgens bovenstaand reinigingsplan



CE 0044



° A.I.S.E.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.



Oxivir Sporicide Wipe CE

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Polypropyleen doekje, 25GSM

pH-waarde (in gebruik): 2.7 ± 0.3

Relatieve dichtheid: 1.03265

Houdbaarheid: 720 dagen

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Informatie over veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking en niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professioneel gebruik.

Reageert met oxideerbare stoffen.

Productcompatibiliteit

Bij het gebruik van Oxivir Sporicide Wipe CE dienen handschoenen te worden gedragen. Niet mengen met andere producten. Niet gebruiken op water- en zuurgevoelige oppervlakken.

Microbiologische gegevens

Raadpleeg EN tabel op de laatste pagina.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

AHP® en het logo en Oxivir® zijn handelsmerken van Diversey, Inc.