



Wundmanagement

## Das Silberalginat aus der Tube Askina<sup>®</sup> Calgitrol<sup>®</sup> Paste

# Das Silberalginat aus der Tube

## Askina® Calgitrol® Paste


Askina® Calgitrol® Paste ist eine homogene Silberalginat-Matrix, die sich eng an das Wundbett anpasst und dadurch „tote Räume“ verhindert, in denen sich Bakterien vermehren können.

Askina® Calgitrol® Paste ist steril in einer Tube mit einer langen Tülle verpackt. Diese erleichtert die Applikation der Silberalginat-Matrix in Tunnel, Fistelgänge und weiteren schwierigeren Wundformen.

Askina® Calgitrol® Paste enthält eine durchschnittliche Konzentration von 180 mg ionischem Silber pro 15 g-Tubenapplikation.

### VORTEILE

- Passt sich sehr gut dem Wundbett an
- Wirkt gegen ein breites mikrobielles Spektrum
- Ist sofort einsatzbereit und muss nicht befeuchtet/aktiviert werden
- Wirkt langanhaltend antimikrobiell dank kontrollierter Abgabe der Silberionen
- Schafft ein ideal-feuchtes Wundmilieu
- Lässt sich einfach aus der Wunde entfernen, z. B. durch Spülen mit Prontosan®
- Ist erstattungsfähig

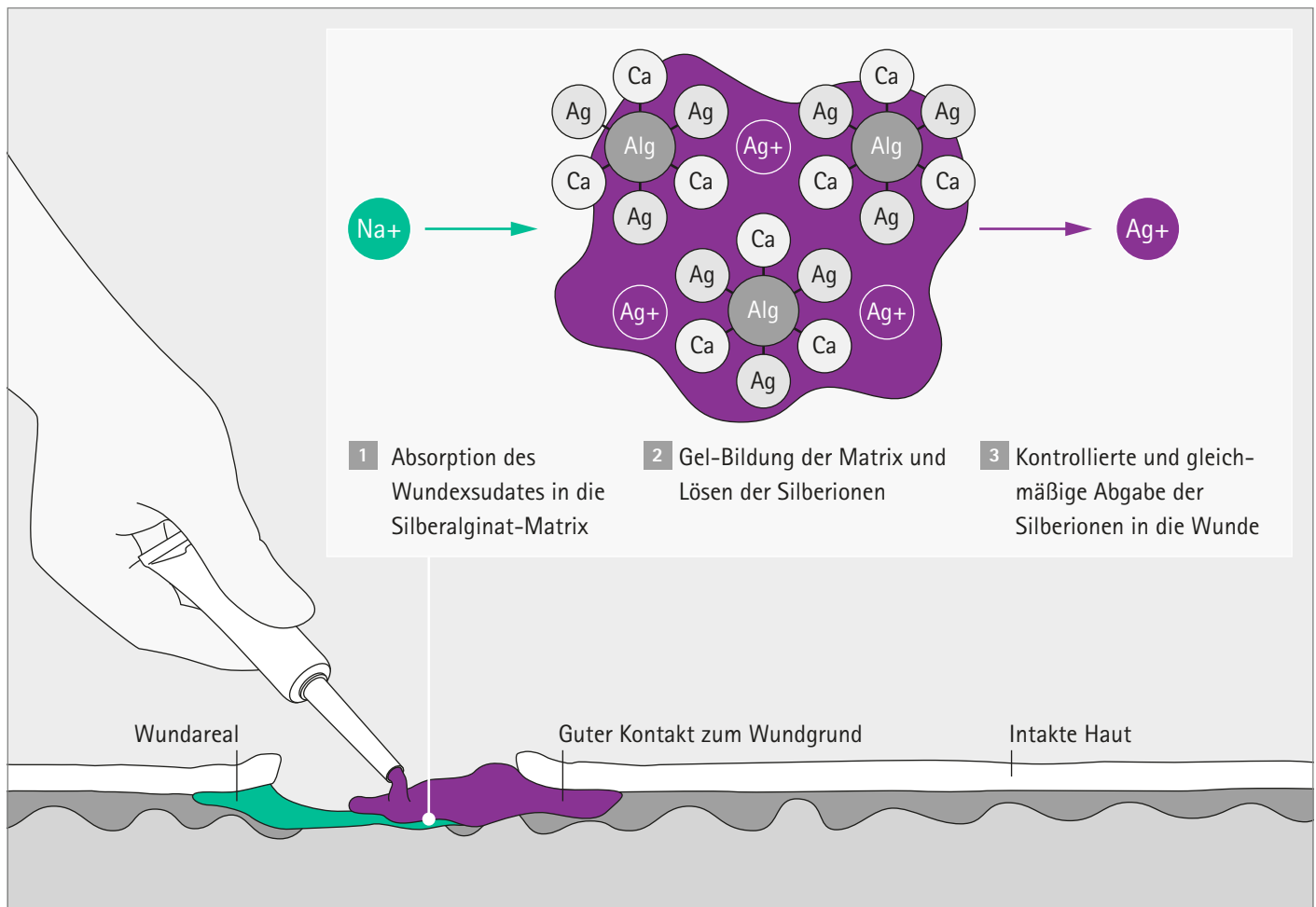

## ANWENDUNGS-TIPP


Tube vor dem Öffnen leicht durchkneten oder schütteln.

- 1 + 2** Applizieren Sie eine dicke Schicht Askina® Calgitrol® Paste auf das gesamte Wundbett.
- 3 + 4** Decken Sie die Wunde mit einer geeigneten Wundauflage (z. B. Askina® Foam, Askina® DresSil Border) ab.


Beim Verbandwechsel entfernen Sie Askina® Calgitrol® Paste einfach und schnell durch gründliche Wundspülung, z. B. mit Prontosan® Wundspüllösung.



### 1. KONTINUIERLICHE SILBERIONEN-ABGABE

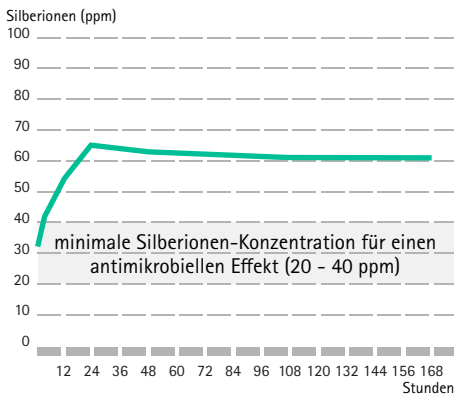


### 2. ANTIMIKROBIELLE WIRKSAMKEIT

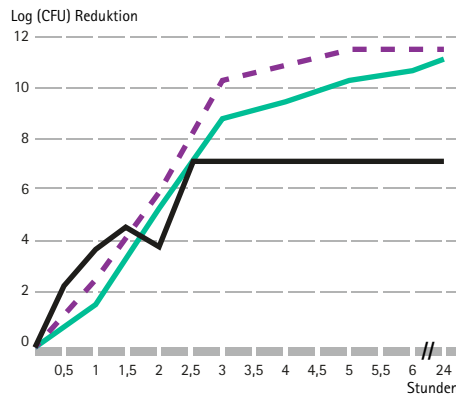

- *Escherichia coli* NCIMB 12416;  
**8,6 Log Reduktion in 3 Stunden**
- - - *Pseudomonas aeruginosa* NCIMB 8626;  
**10,2 Log Reduktion in 3 Stunden**
- Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA, ATCC BAA-44);  
**6,4 Log Reduktion in 3 Stunden**

CFU: Koloniebildende Einheiten  
B. Braun, Reports HOSP283A and HOSP303, 2009

### 3. KEIN SIGNIFIKANTER ANSTIEG DER SILBERIONEN IM BLUTSERUM

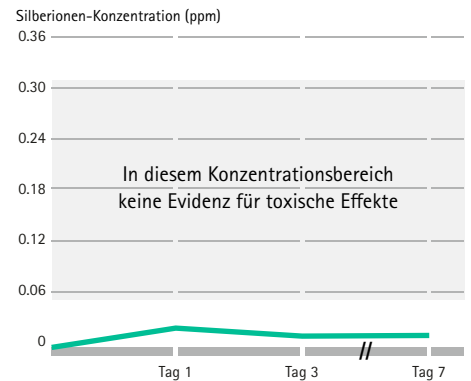

— Askina® Calgitrol® Paste

[NAMSA Report HOSP 257; Wan AT et al 1991]



Askina® Calgitrol® Paste	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
Tube	15 g	5 Stück	6241505	9711530
Tube	15 g	10 Stück	6241510	9711547

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen